

Respuestas a las principales dudas de las pacientes

1 ¿Cuál es la diferencia entre mamoplastia de aumento y mastopexia?

La mamoplastia de aumento es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo aumentar, corregir o devolver el volumen de los senos y aportar un mejor contorno, firmeza y simetría mediante la inclusión del implante de silicona.

La mastopexia es el procedimiento de levantar los senos y eliminar el exceso de piel causado por el envejecimiento, el embarazo, las fluctuaciones de peso, etc. También existe la posibilidad de unir los dos procedimientos, denominada mastopexia con implante, en la que es posible levantar y agrandar los senos al mismo tiempo e aumentar los seios ao mesmo tempo.

CUADRO DOCTOR RESPONDE - Dr Renato Freitas - <https://www.instagram.com/p/ByVfJa9nQs9/> - 05/06/2019

2 ¿Existe más de un formato, proyección y superficie de implante mamario?

Sí. Los implantes mamarios Silimed tienen diferentes formatos y superficies para satisfacer las necesidades del cirujano plástico y sus pacientes, ayudando a cada mujer a lograr el resultado ideal para su cuerpo.

En la línea BioDesign, existen cinco tipos de implantes mamarios con diferentes perfiles y bases (Advance, Maximum, Natural, Enhance y Nuance). Además, los implantes BioDesign tienen 4 tipos de proyecciones (LO, MD, HI y XH) para cada base. En esta línea, los implantes tienen una superficie de **poliuretano** o **texturizada**.

La línea Standard es una opción clásica para implantes redondos que ofrece un relleno más natural a los senos. Las superficies de los implantes de esta línea pueden ser **lisas** o **texturizadas**.



3 ¿Es posible colocar implantes de silicona de diferentes tamaños para corregir asimetrías en la forma y tamaño de las mamas?

Es posible, especialmente en casos de mamoplastia de aumento simple (sin remoción de piel). Cuando la indicación es realizar mastopexia, generalmente se utilizan implantes de igual tamaño y las mamas se simetrizan mediante la extracción del tejido mamario.

CUADRO DOCTOR RESPONDE - Dr Alik Amar Büttner - <https://www.instagram.com/p/B2PCpIPnAW3/> - 10/09/2019


4 ¿Cuáles son las posibles incisiones en la cirugía de mama?

Existen tres tipos de posibles incisiones para el procedimiento: **axilar**, **inframamaria** y **periareolar**. La única que no deja cicatriz en la mama es la axilar. Todas las incisiones tienen la misma función, su cirujano le orientará sobre la más adecuada para usted.

[HTTP://WWW2.CIRURGIAPLASTICA.ORG.BR/CIRURGIAS-E-PROCEDIMENTOS/MAMA/MAMOPLASTIA-DE-AUMENTO/](http://www2.cirurgiaplastica.org.br/cirurgias-e-procedimentos/mama/mamoplastia-de-aumento/) - 07/01/2019 AS 10H00



axilar

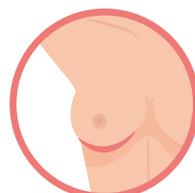

inframamaria



periareolar

5 ¿Cuánto tiempo dura el implante mamario después de la colocación?

Si bien los implantes de silicona no tienen una estimación de vida útil reconocida por la comunidad científica, Silimed establece un plazo medio de 10 años. Sin embargo, cada cuerpo reacciona de forma diferente y este parámetro se puede cambiar cuando sea necesario. Entonces, Silimed recomienda a la paciente el seguimiento clínico anual con su cirujano plástico.

6 ¿Es posible amamantar después de colocar el implante mamario?

El implante mamario no interfiere con la lactancia. La cirugía se suele realizar por detrás de las glándulas mamarias, por lo que el espacio que ocupa el implante no viola estas glándulas que producen y almacenan la leche materna.

[HTTPS://SBP-SC.ORG.BR/ARTIGOS/MULHERES-COM-PROTESE-DE-SILICONE-PODEM-AMAMENTAR/](https://sbcp-sc.org.br/artigos/mulheres-com-protese-de-silicone-podem-amamentar/) - 26/12/2019 - 13H37

7 Después de la colocación del implante mamario, ¿puede la mujer hacerse una mamografía? da colocação do implante mamário, a mulher pode fazer mamografia?

Sí, puede realizar la mamografía que le solicite el médico. Pero es necesario informar la existencia del implante antes de realizar el examen.

[HTTPS://CBR.ORG.BR](https://cbr.org.br) - 26/12/2019 - 15H00 - PARECER: Consentimento informado para realização de mamografia em portadoras de próteses e implantes

8 ¿Ocurre la pérdida de sensibilidad de la mama y el pezón después de la cirugía?

Es común tener un cambio temporal en la sensibilidad poco después de la cirugía, seguido de un retorno gradual a la normalidad, lo que puede llevar algunos meses.

[HTTPS://WWW.LUCIANAEPINO.COM.BR/BLOG/VERDADES-E-MENTIRAS/PROTESE-MAMARIA-E-PERDA-DE-SENSIBILIDADE/](https://www.lucianaepino.com.br/blog/verdades-e-mentiras/protese-mamaria-e-perda-de-sensibilidade/) - 20/12/2019 - 11h00

9 ¿Puede el gel presentar alguna fuga?

No. El **gel de relleno HSC Silimed es altamente cohesivo**. Esta alta cohesión posee una propiedad responsable de mantener la proximidad entre las moléculas del gel de silicona, no permitiendo que el gel se mueva en caso de rotura.



10 ¿En qué circunstancias es necesario cambiar el implante mamario?

El implante mamario debe reemplazarse en algunas situaciones, como una contractura capsular importante (grado III o IV) o la ruptura del implante. Estas condiciones generalmente ocurren después de varios años con la prótesis y se evidencian mediante el examen de ultrasonido de mama. Existen otras situaciones poco frecuentes en las que es necesaria una reintervención, como hematomas (sangrado postoperatorio, que puede ocurrir en los primeros días después de la cirugía) e infección quirúrgica. En este último caso, suele ser necesario retirar el implante y colocar uno nuevo transcurridos unos 3 meses.

CUADRO DOCTOR RESPONDE - Dr Aluizio Machado - <https://www.instagram.com/p/B6DcfN3JaLu/> - 14/12/2019

CONSULTE SIEMPRE A SU CIRUJANO PLÁSTICO

Las mamas son marcas de feminidad y maternidad y, para muchas mujeres, cambiar o corregir las mamas es la realización de un sueño. Cuando la mujer no está satisfecha con sus propias mamas por su tamaño, porque son asimétricas, porque presentan flacidez o ptosis por pérdida de peso y lactancia y porque están atrofiados, tiene baja autoestima, su estado psicológico se ve afectado y se decide por la cirugía de aumento o reconstrucción mamaria. Al momento de decidirse por los implantes mamarios, surgen muchas dudas. Con eso en mente, Silimed, el mayor fabricante de implantes de silicona de América Latina y líder de ventas en Brasil, creó este material para ayudar a las mujeres a comprender sus necesidades, aclarar sus principales dudas y sentirse más seguras y con confianza ante la decisión. **Después de todo, existen diferentes implantes para diferentes biotipos.**

SILIMED

Presente en el mercado desde 1978, Silimed tiene por vocación contribuir con la cirugía plástica, promoviendo tanto la investigación como estudios científicos, y desarrollando tecnologías para satisfacer diferentes las necesidades de las pacientes. Todos los productos Silimed están fabricados con materias primas de calidad y tecnología de última generación, lo que garantiza todas las certificaciones necesarias para su actuación. Hoy, Silimed está presente en varios países.

CERTIFICAÇÕES

Todos los productos Silimed están fabricados con materias primas de calidad y tecnología de última generación, lo que garantiza todas las certificaciones necesarias para su actuación.

BRASIL

Instalaciones y procesos de producción inspeccionados y productos registrados/inscritos en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Tecnología (INT) y el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) Las condiciones ambientales y las técnicas de producción están controladas por las Buenas Prácticas de Fabricación para Productos Médicos (BPF) de ANVISA.

OTROS PAÍSES

Actuar de conformidad con todos los requisitos formales de cada ministerio de salud en los países donde se distribuyen sus productos.

ISO 13485

Obtuvo la ISO 13485, estándar internacionalmente reconocido para el sistema de gestión de calidad para la industria de dispositivos médicos.



100% silicona de grado médico que ayuda en el tratamiento de queloides, cicatrices comunes e hipertróficas asociadas con eritema

FORMA	UNIDAD P/EMP.	TAM.	INDICACIONES
 ca	1	10 x 10 cm	Cicatrices amplias o dispersas, como las quemaduras.
 tira	1 2	30 x 2 cm	Cicatrices lineales como abdominoplastia, mamoplastia, cesárea, cirugía cardíaca, etc.
 disco	1	7cm (diámetro)	Cicatrices areolares, tanto de reducción mamaria como de aumento mamario.
 coat	1	15g	Áreas descubiertas, que no tienen contacto con la ropa.

MÁS INFORMACIÓN

Acceda: www.silimed.com/es/tratamiento-de-cicatrices



Silimed Indústria de Implantes Ltda.

Rua Figueiredo Rocha, 374
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • CEP: 21240 - 660
Tel: + 55 (21) 3687-7000

Servicio al cliente:

ask@silimed.com.br

Técnico responsable:

Marlos de Oliveira e Souza
Químico - CRQ (III) RJ: 03230137

ANVISA:

Implantes mamarios:
10102180060 | 10102180066 | 10102180002

WWW.SILIMED.COM

Silimed Latam

@Silimed.latam

FLH107 01/2020

¿Qué falta para que tome su decisión?

RESPONDEMOS LAS PRINCIPALES PERGUNTAS SOBRE IMPLANTES MAMARIOS



conectando ciencia y bienestar